



GO

Mitä eroa on Nosiboo Pro:lla ja Nosiboo Go:lla?

KIDSMED	<b>PRO</b> 	<b>GO</b> 
PAINO	972G	375G
VIRTALÄHDE	AC	LADATTAVA AKKU
IMUTEHO L/SEK	9	8
MELUTASO (DB)	55-62	55-62
IMUTEHON SÄÄTÄMINEN	IMUNSÄÄDÖN VIRTAPAINIKE	TOIMII YHDELLÄ IMUTEHON TASOLLA. SAMA KUIN PRO:N VOIMAKKAIN IMUTASO.
TOIMINTA-AIKA	15 MIN (50MIN TAUKO)	10 MIN (KÄYNNISTÄ UDELLEEN)
VÄRI	PINKKI, SININEN, VIHREÄ	VIHREÄ
HINTA	139 €	159 €

**Sopiiko GO ja sen imuvoima vastasyntyneelle?**

Kyllä, kaikki Nosiboo-tuotteet ovat sopivia käytettäväksi syntymästä lähtien, eikä sen imuvoima rasita lapsen nenää liikaa! Imulujuudet määritellään yhteistyössä lääkärin kanssa.

**Pitäisikö minun laidetta tilaessa ostaa heti myös lisävarustepaketti?**

Ei tarvitse, koska laitteen kanssa saat kaiken tarvitsemasi aspiraattorin välittömän käyttöön. Mutta jos sinulla on kotona monta aspiraattoria käyttävää lasta, on hygieenisestä näkökulmasta järkevää ostaa ylimääräinen suutin/Colibri-pää (lisävarustepakettiin sisältyvä).

### **Onko Go iskunkestävä?**

Ei, Go ei ole iskunkestävä ja laitetta tulisi ehdottomasti käsitellä varovasti kuten kaikkia muita lääkinnällisiä laitteita.

### **Kuinka kauan laitetta voidaan käyttää lataamisen jälkeen?**

Go-aspiraattoria voidaan käyttää 30 minuuttia latauksen jälkeen. Laite kytkeytyy automaattisesti pois päältä 10 minuutin jatkuvan käytön jälkeen, jotta estää liiallista käyttöä. Tauon jälkeen voit käynnistää laitteen uudelleen.

### **Mitkä laitteen osat on pestävä ja millä?**

Vain Penguin-päät tulisi pestä heti käytön jälkeen. Osat on pestävä huuhtelemalla lämpimällä juoksevalla vedellä.

### **Pitääkö minun ehdottomasti pestä pää heti laitteen käytön jälkeen?**

Kyllä, jos jätät eritteen Pingviinin päähän, se voi vuotaa laitteen moottoriin. Jos erite pääsee koneeseen, laite vaurioituu ja takuu ei kata sen korjaamista. Jos käytät Nosiboodia yöllä ja pesu on mahdotonta/hankalaa tällä hetkellä, irrota Penguin-pää laitteen rungosta ja pese se mahdollisimman pian.

### **Nosiboo Go –suodattimella on epämiellyttävä haju, se on likainen tai kostea. Mitä minun pitäisi tehdä?**

Jos sinun Go-suodattimellesi on tapahtunut juuri näin, sinun kannattaa ehdottomasti ostaa uusi suodatin. Suodattimia on saatavana myymässämme lisävarustesarjassa, suodattimia ei tarjoa erillinen valmistaja. Älä missään tapauksessa pese vahingoitunutta suodatinta! Jos suodatinta pestään, se menettää tehtävänsä eikä enää suojaa laitetta. Suodatin voi kastua tai likaantua vain väärän käytön seurauksena:

-Et ole puhdistanut laitteen päätä heti käytön jälkeen ja erite on juuttunut koneeseen. Laite on puhdistettava HETI, jopa yöllä!

-Olet kytkenyt laitteen pään koneeseen ilman kuivamaatta sitä.

-Penguin-pään sisällä olevaa kaulaputkea ei ole kiinnitetty kunnolla uraan.

### **Onko mahdollista ostaa suodatin, suutin tai kaulaputki erikseen?**

Valitettavasti ei. Kaikki ne osat ovat saatavana lisätarvikepaketissa. Niitä ei voi ostaa erikseen.

### **Voiko BPA-vapaa nenäsuutinta ostaa eri kokoisina?**

Ei, kaikilla Nosiboo-aspiraattoreilla on samankokoiset suuttimet. Koska laitteen suutinta ei tarvitse työntää syvälle saadaksesi eritettä, suutin sopii kaikkiin pieniin neniin.

### **Lapseni itkee, kun puhdistan hänen nenäänsä. Mitä minun pitäisi tehdä?**

Valitettavasti suurin osa lapsista, jotka eivät ole vielä tarpeeksi vanhoja ymmärtämään aspiroinnin tarvetta ja sen etuja, lakkoilevat. Puhdistus Nosiboo-laitteilla ei todellakaan ole

lapselle kivuliasta. Imeminen saa vauvan tuntemaan olonsa hieman epämukavaksi kutistustunteen takia muutaman sekunnin ajan. Pikemminkin lapset eivät siitä, että heidät kiinnitetään, ja in siksi he huutavat. Koska puhdistaminen laitteellamme kestää kuitenkin vain muutaman sekunnin, suosittelemme, että suoritat puhdistuksen loppuun ja tarjoat sen jälkeen lapselle runsaasti hellyyttä. Loppujen lopuksi kaikki on hyvään tarkoitukseen, ja parempi on valita muutama sekunti kuin itkevä lapsi, joka ei syö eikä nuku päivät ja yöt.

### **Kuinka nopeasti tilaus saapuu?**

Toimitus Suomeen kestää 1–3 työpäivää.

### **Jos en pidä Nosiboo-nenäimuria, voinko palauttaa sen?**

Tuote voidaan palauttaa 14 päivän kuluessa vain, jos tuote on virheetön, täydellinen, käyttämättä ja alkuperäisessä pakkauksessaan. Käytettyä tuotetta ei voi palauttaa. **Koska kyseessä on lääkinällinen laite, käytettyä tuotetta ei voida palauttaa.**

HUOM! Jos suojakalvo laitteen ympäriltä tai lämpömittarin ruudulta on poistettu, laitetta ei voi palauttaa.

### **Annetaanko Nosiboo:lle takuu?**

Kyllä, Nosiboo:lle annetaan 2 vuoden takuu. (paitsi Nosiboo Go -akku). Nosiboo Go -akulla on 6 kuukauden takuu.

### **Voinko noutaa tilaamani Nosiboo:n itse?**

Kyllä, voit noutaa tuotteen osoitteesta Teaduspargi 9A, Tallinna, Viro. Ota yhteyttä meihin etukäteen:+372 5787 0702. Niin sovimme noutoajasta.

### **Voiko tuotteita ostaa myös jostakin kaupasta?**

Ei, tarjoamamme tuotteet ovat saatavilla vain verkkokaupassamme: [www.kidsmed.fi](http://www.kidsmed.fi)

### **Mistä löydän tietoa meneillään olevista kampanjoista ja tarjouksista?**

Pysyäksesi ajan tasalla erilaisista tarjouksista ja tarjouskoodeista, sinun on seurattava sosiaalista mediaamme Facebookissa Kidsmed Suomi ja ehdottomasti Instagramissa Kidsmed Suomi.