




GO

Koks skirtumas tarp „Nosiboo Pro“ ir „Nosiboo Go“?

	<p>PRO</p> 	<p>GO</p> 
SVORIS	972G	375G
MAITINIMAS	KINTAMA	ĮKRAUNAMA BATERIJA
SIURBIMO GALIA L/SEK	9	8
GARSO LYGIS (DB)	55-62	55-62
SIURBIMO GALIOS REGULIAVIMAS	REGULIUOJAMAS SIURBIMO MAITINIMO MYGTUKAS	VEIKIA VIENU SIURBIMO GALIOS LYGIU. LYGUS MAKSIMALIAM PRO IŠSIURBIMO LYGIUI.
VEIKIMO LAIKAS	15 MIN (50MIN PERTRAUKA)	10 MIN (VĖL PALEISKITE IŠ NAUJO)
SPALVA	ROŽINĖ, MĒLYNA, ŽALIA	ŽALIA
KAINA	139 €	159 €

„Nosiboo Pro“ didesnis, naudojamas prijungus prie elektros tinklo, galingumą galite reguliuoti. „Nosiboo Go“ kompaktiškesnis, patogiau nešiojamas, veikia su įkraunama baterija, galingumas nereguliuojamas (jis apytikriai atitinka didžiausią „Nosiboo Pro“ galingumą), veikia tyliau nei „Nosiboo Pro“.

Ar GO ir stipriausia siurbimo galia tinka naujagimiui?

Taip, visi „Nosiboo“ produktai yra tinkami naudoti nuo pat gimimo ir net intensyviausias režimas nepakenks kūdikio nosytei! Reguluojant siurbimo stiprumą reikia atsižvelgti į išskyrų tankį, o ne į vaiko amžių. Siurbimo galia nustatoma bendradarbiaujant su gydytojais.

Ar užsisakant prietaisą reikėtų užsisakyti papildomų priedų rinkinį?

Nebūtina, nes su prietaisu gausite viską, ko reikia, kad galėtumėte nedelsdami jį naudoti. Tačiau jei namuose turite kelis vaikus, kuriems reikalinga aspiracija, tuomet, atsižvelgiant į higieną, tikslinga įsigyti papildomą kolibrio antgalį / galvutę (yra ir priedų rinkinyje).

Ar „Go“ yra atsparus smūgiams?

Ne, „Go“ nėra atsparus smūgiams ir su juo reikia elgtis atsargiai, kaip ir su bet koku kitu medicinos prietaisu.

Kiek trunka prietaiso įkrovimas?

„Go“ aspiratorių galima naudoti po 30 minučių įkrovimo. Prietaisas automatiškai išsijungia po 10 minučių naudojimo, kad būtų išvengta per didelio naudojimo. Po pertraukos vėl galite įjungti prietaisą.

Kurias prietaiso dalis ir kuo reikėtų plauti?

Iš karto po naudojimo reikia plauti tik „Penguin“ galvutes. Dalys turėtų būti plaunamos po šiltu tekančiu vandeniu.

Ar po naudojimo būtina praskalauti prietaiso galvutę?

Taip, jei paliksite išskyras „Penguin“ galvutėje, jos gali prasiskverbti į prietaiso variklį. Jei išskyras patenka į prietaisą, jis sugenda ir jo remontui garantija netaikoma. Jei naudojate „Nosibood“ naktį ir tuo metu yra neįmanoma ar sunku praskalauti, atsukite „Penguin“ galvutę nuo žarnelės ir praskalaukite kai tik galėsite.

„Nosiboo Go“ filtras skleidžia nemalonų kvapą, yra purvinas ar drėgnas. Ką daryti?

Jei taip nutiko su jūsų „Go“ filtru, tikrai turėtumėte įsigyti naują filtrą. Filtrai yra su kartu parduodamais mūsų „Perepak“, gamintojas nesiuo atskirų filtrų. Niekada neplaukite sugadinto filtro!

Plaunant jis praranda savo funkciją ir nebegali apsaugoti prietaiso. Filtras gali sušlapti ar išsipurvinti tik dėl netinkamo naudojimo:

- Iškart po naudojimo neišvalėte galvutės, o išskyras liko prietaise.
- Prietaisą reikia IŠ KARTO valyti, net ir naktį!
- Nuplovę galvutę, jos neišdžiovinote ir įdėjote į prietaisą.
- „Penguin“ galvutėje esanti jungtis nėra tinkamai įkišta į griovelį.

Ar po iškart po naudojimo reikia praskalauti prietaiso galvutę?

Taip, jei išskyras lieka kolibrinio galvutėje, jos gali prasiskverbti į žarnelę ir iš ten į prietaiso variklį. Jei išskyras patenka į prietaisą, jis sugenda ir jo remontui garantija netaikoma. Jei naudojate „Nosibood“ naktį ir tuo metu yra neįmanoma ar sunku praskalauti, atsukite kolibrinio galvutę nuo žarnelės ir praskalaukite kai tik galėsite.

Ar galima atskirai įsigyti filtrą, antgalį ar jungtį?

Deja, ne. Visos šios dalys yra įtrauktos į priedų rinkinį. Atskirų dalių įsigyti neįmanoma.

Ar galima įsigyti įvairių dydžių nosies antgalių be estrogeno veikliosųjų medžiagų?

Ne, visos „Nosiboo“ aspiratoriaus galvutės yra vienodo dydžio. Kadangi išskyrų ištraukimui antgalio nereikia gliai kišti į nosytę, antgalis tinka visoms mažoms nosytėms.

Mano kūdikis pradeda verkti, kai valay jam nosytę. Kaip elgtis tokioje situacijoje?

Deja, dauguma vaikų, kurie dar per maži, kad suprastų aspiracijos būtinumą ir teigiamus aspektus, dažnai bando tam priešintis. Valymas „Nosiboo“ prietaisais nesukelia vaikams jokio skausmo. Pats siurbimas kelioms sekundėms gali vaikui sukelti nemalonų kutenimą. Būtent vaikai nemėgsta, kai juos laiko ir, kaip taisyklė, būtent tai yra verkimo priežastis. Kadangi mūsų prietaisais nosytės valymas užtruks vos kelias sekundes, rekomenduojame užbaigti šią procedūrą ir apdovanoti vaiką gausių švelnumu. Juk visa tai daroma vaiko labui, tad ar ne geriau tam skirti porą sekundžių nei visą naktį ir dieną nevalgiusiam ir nemiegojusiam vaikui?

Ar greitai gausiu užsąkytą gaminį? Į Lietuva prekė pristatoma per 1–2 darbo dienas.

Jei „Nosiboo“ nosies siurbtukas man nepatinka, ar galiu jį gražinti ?

Prekę galima gražinti per 14 dienų tik tuo atveju, jei ji neturi trūkumų, yra visiškai sukomplektuota, nenaudota ir originalioje pakuotėje. Naudotų prekių gražinti negalima.

Kuna Jei kalbėsime apie medicinos prietaisus, panaudotų prekių gražinti negalima. NB! Jei nuo prietaiso ar termometro ekrano yra pašalinama apsauginė plėvelė, jo gražinti negalima.

Ar nosies siurbtukui „Nosiboo“ taikoma garantija?

Taip, „Nosiboo“ taikoma 1 metų garantija. (išskyrus „Nosiboo Go“ akumuliatorių).

„Nosiboo Go“ akumuliatoriui suteikiama 6 mėnesių garantija.

Ar galiu pats (-i) ateiti atsiimti nosies siurbtuko „Nosiboo“?

Taip, galite prekę atsiimti Taline (Estijoje) adresu: Teaduspargi 9A. Prieš tai susisiekiite su mumis: +372 5787 0702. Suderinsime Jūsų atvykimo laiką.

Ar visus „Kidsmed“ siūlomus gaminius galima įsigyti išsimokėtinai?

Žinoma taip. Iškart po to, kai e-parduotuvėje pridėjote prekę į krepšelį ir perėjote prie mokėjimo.

Kur galėčiau rasti informacijos apie vykstančias kampanijas ir privilegijas?

Norėdami stebėti mūsų kampanijas ir nuolaidas, turite sekti mūs socialiniuose tinkluose „Facebook“ („Kidsmed Latvija“) ir Instagrame „Kidsmed.lt“.